

**snøgg®**



## **BRANNSKADER**

Hydrogel • Burnshield Brannbandasjer



TICKET

# Hva gjør du ved brannskader?

1



Vær forberedt på at det kan oppstå brannskader. Ha utstyret og kunnskapen i orden, og forbered deg mentalt på å handle hurtig hvis noen skulle bli brannskadd.

2




Sikre pasienten for ytterligere skader, slukk eventuell brann i klær og hår. Ikke fjern fastbrente klær fra brannsåret og start nedkjøling med vann eller Burnshield brannbandasjer umiddelbart. Kjøl i kaldt vann i 3 minutter og deretter lunkent vann i 30 minutter.

3



Ved mindre brannskader, tilpass Burnshield brannbandasjer til brannsårets størrelse og plasser dem direkte i såret. Fest dem løst med en Snøgg forbindelse. **Kjøl kun brannskaden!**

4

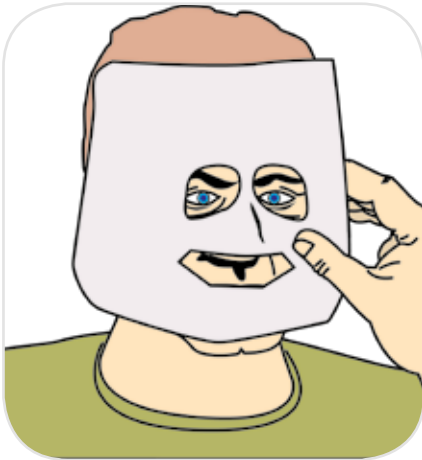

Ved brannskader i ansiktet og hodet benytt brannbandasje og hydrogel. Pass på å lage hull i bandasjen slik at pasienten får puste. Hell hydrogel direkte i brannsåret ved skader på øre og nese.

5



Ved større brannskader på overkroppen og beina - benytt Burnshield brannteppe. Pass på at pasienten har frie luftveier og puster. Vær på vakt mot generell nedkjøling og sirkulasjonssvikt.

6



Ring **113** ved alvorlige brannskader eller kontakt lege. Si hvem du er og hvor du er. Beskriv hva som har skjedd. Bruk Burnshield brannbandasje og hydrogel under transport.



## Burnshield

Burnshield produktserie består av ulike, våte brannbandasjer og gele brukt i forbindelse med små og store brannskader.

Geleen er vannbasert og består av 96% vann som kjøler, fukter og beskytter brannskaden. Geleen har også en lindrende effekt.

Burnshield produktene er sterile og kan brukes direkte på åpne sår osv. De er mye brukt av blant annet profesjonelle som håndterer pasienter med ulike brannskader. Geleens konsistens gjør den er lett å påføre, og geleen blir værende på den brannskadde delene av kroppen pga sin konsistens.

Den er lett å skylle av i vann, og irriterer ikke huden.

Burnshield leveres som sterile kompresser og sterile branntepper i ulike størrelser, samt poser og flasker som inneholder kun Hydrogel.



1



2

## Hydrogel

Hydrogel brannskadegele fukter, lindrer og kjøler brannskader. Påfør rikelig. Hydrogel kan også anvendes ved solforbrenning og svie etter brannmaneter. Hydrogel leveres i praktiske størrelser tilpasset ulike behov.

- 1 Best.nr: 871014 Hydrogel 125 ml. flaske med pumpe
- 2 Best.nr: 871002 Hydrogel 1 ltr
- 3 Best.nr: 871001 Hydrogel burnblott 3,5 ml



3



### Brannbandasjer

- 4 Best. nr : 870013 Burnshield, 10 x 10 cm
- 5 Best. nr : 870014 Burnshield, 20 x 20 cm
- 6 Best. nr : 870010 Burnshield, 20 x 45 cm ansiktsbandasje
- 7 Best. nr : 870011 Burnshield, 60 x 40 cm





9



8

### Branntepper

Burnshield Brannbandasjer fukter, lindrer, kjøler og beskytter brannskaden. Pakningene er sterile for å redusere faren for infeksjoner, og geleen i brannbandasjen skylles uproblematisk ut av såret med vann. Vi har et godt utvalg med bandasjer i fornuftige størrelser tilpasset dine sikkerhetsbehov.



- 8 Best.nr: 870100 Burnshield branntepper, ullmiks, 120 x 160 cm
- 9 Best.nr: 871110 Bomull, 100 x 100 cm
- 10 Best.nr: 871115 Bomull, 100 x 200 cm

### Snøgg Brannskadekoffert

Innholdsrik koffert for behandling av brannskader.  
**Inneholder:** Soft NEXT limfritt plaster i to størrelser  
 Burnshield 60 x 40 cm • Burnshield 20 x 20 cm  
 Burnshield 10 x 10 cm Hydrogel 125 ml  
 Førstehjelpshefte • Burnshield A7 folder

**Produktinformasjon:**

H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm

- 11 Best.nr: 872035 Snøgg Brannskadekoffert, oransje

### Snøgg Brannskadeskrin

Brannskadeskrin for behandling av mindre brannskader.  
**Inneholder:** Soft NEXT limfritt plaster i to størrelser • Burnshield  
 20 x 20 cm • Burnshield 10 x 10 cm • Hydrogel 125 ml  
 Hydrogel 3,5 ml • Førstehjelpshefte • Burnshield A7 folder

**Produktinformasjon**

H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm

- 12 Best.nr: 872030 Snøgg Brannskadeskrin, oransje



11



### First Aid Burn Kit

Skrin som inneholder utstyr for å kunne kjøle ned brannskader og behandle små kuttskader. Passer til bruk i hjemmet, på hytta, i båten og på arbeidsplassen.

**Produktinformasjon:**

H: 12,5 cm, B: 17 cm, D: 5 cm

- 13 Best.nr: 872045 Burn Kit

### Aluderm Kompress

Steril aluminisert kompress. Brukes blant annet i etterbehandling av brannskade.

- 174 Best.nr: 81019 Aluderm, steril, 35 x 45 cm  
 Best.nr: 81014 Aluderm, steril, 60 x 80 cm  
 Best.nr: 81005 Aluderm, steril, 73 x 220 cm  
 Best.nr: 81044 Aluderm, steril, 140 x 220 cm

13



14

## BRANNSKADER