

snogg®



FØRSTEHJELP TIL DYR

Bandasjer





Animalbandasjeserien er effektiv og rasjonell i bruk. Du kan bygge opp bandasjen etter behov og anatomiske strukturer. Da flere av dem er tverrelastiske, økes fleksibiliteten og dyrets velbehag. Bandasjene er økonomiske i bruk.

POTEBANDASJE katter - små hunder

1. Først en runde til feste av polstringen mellom tærne



AnimalSoft 3 cm



2. Heft en tilpasset lengde til nr. 1. Vri den rundt 180 grader. Det tynneste punktet trees mellom tærne. Heft AnimalSoften på undersiden. Gjenta dette.

3. Fullfør bandasjeringsen med AnimalSoft eller AnimalVet. Fikser med Elasto-Quick

Trykkbandasje lages enkelt ved å rulle AnimalSoft eller AnimalVet. Prinsippet benyttes på sår med mye betennelsesvæske for å øke "lift and store" effekten.

Ørebandasjering




1. Form en propp av AnimalVet for å verne øregangen, og en pute til fiksering av øret.

AnimalVet 4,5 cm



2. Puten fikseres med AnimalVet.

AnimalPolster 14 cm

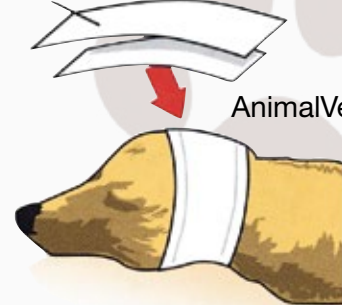


AnimalVet 9 cm

3. Øret bandasjeres med AnimalVet og fikseres med en bredere PolsterPlast som hefter til pels.

POTEBANDASJE

1. Først polstres det mellom trødeputen og tærne.

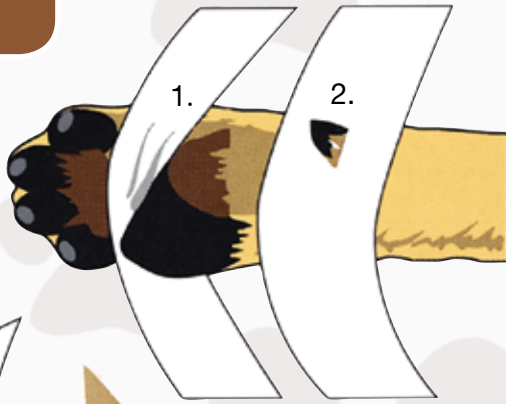

2. Klipp et snitt i AnimalVet. Polstre sporen.



3. Tilpass en lengde med AnimalVet. Klipp snitt til tærne.



4. Tre tærne gjennom snittene og brett bandasjen som på fig. over.




5. Hvis aktuelt polstre med en ekstra omgang AnimalVet,


FRAKTURER



1. Benytt samme fremgangsmåte som ved potebandasjering. Det er viktig å polstre en omgang ekstra med AnimalVet.

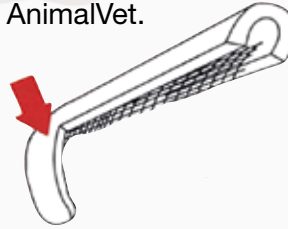

2. Polstre alle kantene på den tilpassende skinnen med AnimalPolster.

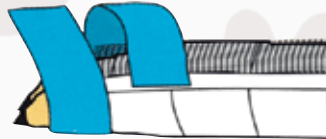

1. Fikser skinnen med ElastoQuick. Denne metoden eliminerer risikoen for gnagsår. Med frie tær økes bevegligheten og blodsirkulasjonen, og muskelaktiviteten stimuleres.



NB! ET GRISETIPS
Ved "splayed legs" legges en omgang 3 cm AnimalSoft rundt bena. Med fingertuppene heftes bandasjen sammen mellom bena.





BANDASJER FOR DYR

Effektiv og rasjonell i bruk



AnimalSOFT



AnimalSoft er en limfri, tettsittende og tverrelastisk bandasje som er lett å forme og gir stor bevegelighet. AnimalSoft er selvheftende og kleber ikke til hud, pels eller sår. Kan legges rett på såret.

AnimalVET



En unik skumbandasje som bare hefter til seg selv, ikke til hud, pels og sår. Sterk, elastisk og enkelt å forme. Kan legges rett på såret.

AnimalPOLSTER



Skumbandasje med lim på den ene siden. Den benyttes til polstring og fiksering. Til sårbehandling benyttes den sammen med AnimalVet og AnimalSoft.

ELASTO[®] Sport quick



Elastisk selvheftende bandasje uten lim. Brukes til lett støttebandasje og til fiksering av kompresser og andre bandasjer. ElastoQuick Sport former seg lett etter kroppen og hefter i seg selv og kan enkelt rives i ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår.

FØRSTEHJELP TIL DYR



Bandasje fordeler:

- Selvhæftende lateksfri
- Hefter kun til seg selv (Legges rett på sår)
- Myk
- Elastisk
- Porøs
- Absorberende
- Stopper blødninger
- Hefter selv i vann
- Tilfredstiller krav til primær lag
- Tilfredstiller krav til sekundær lag
- Tykkelse 1,9 mm

Best.nr: 013074 AnimalSoft 6 cm x 4,5 m



Bandasje fordeler:

- Selvhæftende lateksfri
- Hefter kun til seg selv (Legges rett på sår)
- Myk
- Elastisk
- Porøs
- Absorberende
- Stopper blødninger
- Hefter selv i vann
- Tilfredstiller krav til primær lag
- Tilfredstiller krav til sekundær lag
- Tykkelse 5 mm

Best.nr: 013071 AnimalVet 8 cm x 1 m

Best.nr: 013072 AnimalVet 8 cm x 5 m

Best.nr: 013073 AnimalVet 14 cm x 5 m



Bandasje fordeler:

- Selvhæftende
- Myk
- Elastisk
- Porøs
- Absorberende
- Tilfredstiller krav til primær lag
- Tilfredstiller krav til sekundær lag
- Tykkelse 5 mm

Best.nr: 012116 AnimalPolster 9 cm x 2 m

Best.nr: 012117 AnimalPolster 14 cm x 2 m



Bandasje fordeler:

- Selvhæftende
- Elastisk i lengden
- Porøs
- Tilfredstiller krav til primær lag
- Tilfredstiller krav til sekundær lag
- Fiksering

Best.nr: 046001 ElastoQuick 7,5 cm x 4,5 m, grønn

Animalbandasjeserien er produsert i forskjellige størrelser slik at de skal kunne passe til store og små dyr. Derfor vil du finne samme bandasje type i flere størrelser.



Ved sår på spener, eller på lukkemuskel benyttes AnimalSoft.

Utnytt elastisiteten i AnimalVet til å fiksere f.eks. ved leddinjeksjon.



Bandasjering av kode: _____
Bandasjen legges direkte på injeksjonsstedet. For å unngå at bandasjen glir, er det viktig å utnytte elastisiteten.

Ved bandasjering av hovledd legges først en bandasje fra koden og nedover. Deretter en over injeksjonsstedet. Denne bandasjen må legges godt ned på hoven.

Ved muggbehandling er det nok med en omgang 14 cm AnimalVet.

AnimalPolster på ben: Først legges en omgang AnimalPolster nedenfor sårstedet. Deretter legges AnimalVet over sårstedet med overlapping på et par cm til AnimalPolster. Skift AnimalVet ved behov. AnimalPolster fjernes etter endt behandling.

Bandasjering er en viktig del av behandlingen, og for å få til en god bandasjering trenger du en god bandasje. Snøgg animalbandasjer er en bandasjeserie som består av 4 typer bandasjer, alle utviklet til spesielle bruksområder.



Her er AnimalVet først festet på AnimalPolster og deretter plassert på såret. Benyttes også på smådyr.



AnimalPolster festet direkte på det stedet som skal beskyttes.



Bandasjering etter leddinjeksjon i kne.

Først legges en 14 cm bred AnimalVet bandasje over selve forkneet og så en 9 cm i overkant for fiksering.



Ved helbandasjering av bakben benyttes AnimalVet som primær- og sekundærlag, deretter ElastoQuick som tærtierlag. Den er lett å fjerne.

Hvis f.eks. bandasjen blir for slakk er den enkel å stramme - se pilene.



Har hesten sår i munnen kan bisset bandasjeres med AnimalSoft slik at ubehaget reduseres.



